

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 薬液注入用ノズル 70388000
(止血剤注入キット 70397000)

ボルヒール調製器セット (微量滴下セット)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


本品は、1mLロック付きシリンジとフレキシブルニードルから構成されている。

1) 微量滴下セット

(1) 1mLロック付きシリンジ

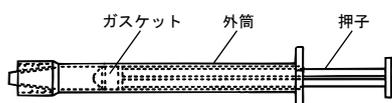

(2) フレキシブルニードル

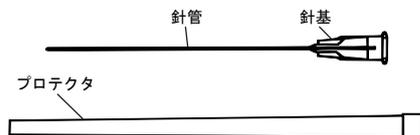

2. 材質

1mLロック付きシリンジ	ポリプロピレン、スチレン系熱可塑性エラストマー
フレキシブルニードル	ステンレス鋼、ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は主に2種類の薬液を混合しつつ注入するための医薬品注入器である。

【使用方法等】

*1. 使用方法

本品の標準的な使用方法を以下に示します。

- 1) ボルヒール調製器セットの使用方法説明書に従い、フィブリノゲン溶液 (A液) 及びトロンビン溶液 (B液) を調製します。(本品の構成品には含まれません。)
- 2) ツートックを用いて、1mLロック付きシリンジにフィブリノゲン溶液 (A液)、又はトロンビン溶液 (B液) を充填します。(ツートックは本品の構成品には含まれません。)
- 3) 1mLロック付きシリンジにフレキシブルニードルを接続し、患部に薬液を滴下します。

2. 組み合わせて使用する医薬品

本品は以下の医薬品と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名：ボルヒール組織接着用

**承認番号：22100AMX01038

製造販売業者：KMバイオロジクス株式会社

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 詰まりが発生した際には新しい製品に交換してください。[薬液硬化のおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について注意すること。
- *2) 本品を使用して血管内へのボルヒール組織接着用の注入を行わないこと。[血管閉塞のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証 (自社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-069

受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造

ニプロ医工株式会社



ニプロ株式会社