

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 薬液注入用ノズル 70388000

ボルヒールスプレーチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は2本のシリンジの先端部を接続するための二又の器具である。

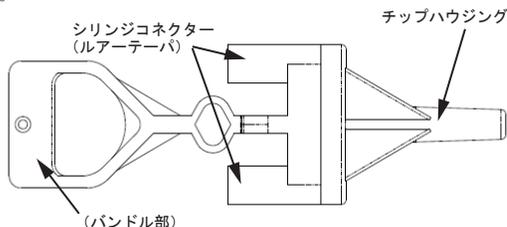

2. 材質

シリンジコネクタ	ポリカーボネート
チップハウジング	

3. 原理

2本のシリンジを本品に接続することにより、シリンジに充填した薬液を混合・噴霧し、患部に塗布する。

【使用目的又は効果】

・本品は2種類の薬液を混合しながら注入するための以下の医療機器専用のノズルである。

一般的名称	販売名	承認番号	製造販売業者
薬液注入用ノズル	ボルヒール調製器セット	22400BZX00212000	ニプロ株式会社

【使用方法等】

1. 使用方法

本品の標準的な使用方法を以下に示します。

- 1) ボルヒール調製器セットの使用方法説明書に従い、フィブリノゲン溶液 (A液) 及びトロンビン溶液 (B液) を充填したシリンジを用意します。(本品の構成品には含まれません。)
- 2) 2本のシリンジの先端部をシリンジコネクタに接続し、バンドル部をボルヒール調製器セットのパレルホルダーに固定します。
- 3) ボルヒール調製器セットのプランジャーホルダーを強く押すことにより接着面へA液とB液を混合しながら噴霧します。
- 4) 使用後は安全な方法で廃棄します。

2. 組み合わせて使用する医薬品

本品は以下の医薬品と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名 : ボルヒール組織接着用
- **承認番号 : 22100AMX01038
製造販売業者 : KMバイオロジクス株式会社

*<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品を塗布部位に接触させないよう注意してください。
2. 噴霧する際はボルヒール調製器セットのプランジャーホルダーの中心部を押してください。[プランジャーホルダーの中心から離れた位置を無理に押すと、シリンジ内で薬液が逆流し、凝固するおそれがあります。]
3. 詰まりが発生した際には新しい製品に交換してください。[薬液硬化のおそれがあります。]

【使用上の注意】

*1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間 : 滅菌後3年 [自己認証 (自社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社
フリーダイヤル : 0120-226-069
受付時間 : 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造
ニプロ医工株式会社

使用方法説明書を必ずご参照ください。



ニプロ株式会社