

ボルヒール調製器セット (微量滴下セット スポイトタイプ)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


本品は薬液の滴下に用いる微量滴下デバイス (2個) とフレキシブルニードル (2本) からなるセット品である。

1) 微量滴下セット スポイトタイプ

(1) 微量滴下デバイス

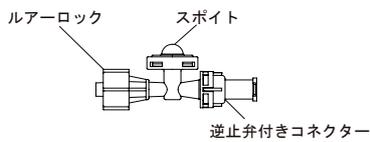

(2) フレキシブルニードル

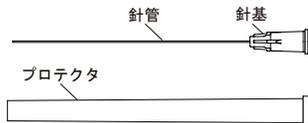

2. 材質

微量滴下デバイス	ポリカーボネート、シリコンゴム
フレキシブルニードル	ステンレス鋼、ポリプロピレン

【使用目的又は効果】


本品は主に2種類の薬液を混合しつつ注入するための医薬品注入器である。

【使用方法等】


1. 使用方法

本品の標準的な使用方法を以下に示します。

- 1) ボルヒール調製器セットの使用法説明書に従い、フィブリノゲン溶液 (A液) 及びトロンビン溶液 (B液) を充填したシリンジを用意します。(本品の構成品には含まれません。)
- 2) 微量滴下デバイスのルアーロックにフレキシブルニードルを接続します (図1参照)。

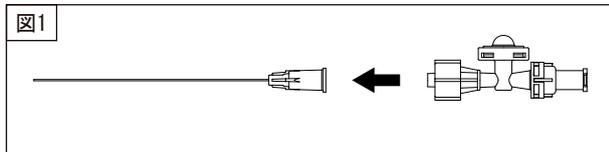


- 3) 微量滴下デバイスの逆止弁付きコネクタに薬液を充填したシリンジを接続し、薬液で微量滴下デバイスとフレキシブルニードル内を満たします (図2参照)。

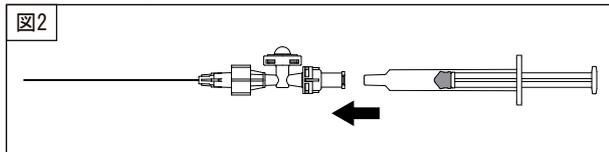

使用方法説明書を必ずご参照ください。

- 4) 微量滴下デバイスからシリンジを取り外します。
- 5) 指で微量滴下デバイスのスポイトを押して、フレキシブルニードルの先端から薬液を滴下します。フレキシブルニードルは、任意の方向に曲げて使用できます (図3、4参照)。

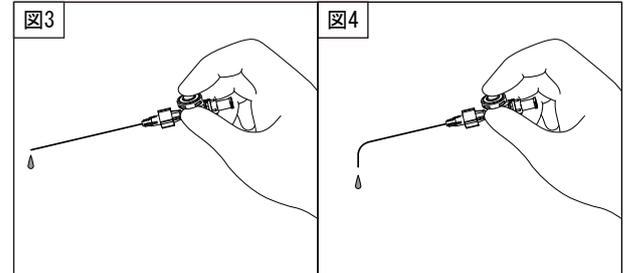

2. 組み合わせて使用する医薬品

本品は以下の医薬品と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名: ボルヒール組織接着用
**承認番号: 22100AMX01038
製造販売業者: KMバイオロジクス株式会社

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 微量滴下デバイスに薬液を注入する際、シリンジの押子はゆっくりと押してください。[強く押子を押すとスポイトが膨張するおそれがあります。]
2. 詰まりが発生した際には新しい製品に交換してください。[薬液硬化のおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間: 滅菌後3年 [自己認証 (自社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

フリーダイヤル: 0120-226-069

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造

ニプロ医工株式会社